

# CORMAY D-DIMER CALIBRATOR

## KALIBRATOR DO OZNACZANIA STĘŻENIA D-DIMERÓW (LIOFILIZOWANY)



D-DIMER CALIBRATOR

4 x 1 ml

Nr kat. 4-259

### ZASTOSOWANIE

CORMAY D-DIMER CALIBRATOR służy jako kalibrator podczas oznaczania stężenia D-dimerów. Dokładne stężenie D-dimerów podane jest na etykiecie fiołki oraz w tabeli poniżej.

### REKONSTYTUCJA I PRZYGOTOWANIE

Po bardzo ostrożnym otwarciu fiołki dodać do niej 1 ml D-DIMER DILUENT. Zamknąć i pozostawić przez około 15 minut w temperaturze pokojowej, od czasu do czasu delikatnie mieszać ułatwiając rozpuszczenie.

Następnie, używając odczynnika D-DIMER DILUENT, przygotować szereg rozcieńczeń, zgodnie z tabelą poniżej:

CORMAY D-DIMER CALIBRATOR		Seria: 707-39				
Rozcieńczenie	1/32	1/16	1/8	1/4	1/2	nierozc.
Stężenie D-dimerów (µg/ml FEU)	0,65	1,3	2,6	5,2	10,4	20,8

W przypadku oznaczeń wykonywanych na analizatorze **Hitachi 911/912** aparat sam wykonuje rozcieńczenia. Wartości kalibratorów dla oznaczeń wykonywanych na Hitachi 911/912:

CORMAY D-DIMER CALIBRATOR		Seria: 707-39
Kalibrator	Stężenie (µg/ml FEU)	
1	0,65	
2	1,3	
3	2,6	
4	5,2	
5	10,4	
6	20,8	

### TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE

1. Kalibrator szczelnie zamknięty i przechowywany w temp. 2-10°C zachowuje trwałość do daty ważności podanej na opakowaniu.
2. Po rekonstytucji, kalibrator przechowywany w temperaturze 2-10°C jest stabilny przez 2 tygodnie.

### UWAGI

1. Kalibrator tylko do badań diagnostycznych in vitro.
2. Kalibrator powinien być stosowany przez odpowiednio wyszkolony personel tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Kalibrator przetestowano na obecność HBsAg oraz przeciwciał anty-HCV i anty-HIV z wynikiem ujemnym. Niemniej jednak należy traktować go jako materiał potencjalnie zakaźny.
4. D-DIMER DILUENT znajduje się w zestawach do oznaczania stężenia D-dimerów.
5. Nie należy mieszać odczynników o różnych numerach serii.
6. Nie należy używać odczynnika po przekroczeniu daty ważności.
7. D-DIMER DILUENT konserwowany azydkiem sodu (< 0,1%).  
Unikać kontaktu odczynnika ze skórą i błonami śluzowymi.

### UTYLIZACJA ODPADÓW

Postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Data wydania: 07. 2017.

### WYTWÓRCA

**PZ CORMAY S.A.**  
ul. Wiosenna 22,  
05-092 Łomianki, POLSKA  
tel.: +48 (0) 81 749 44 00  
fax: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>

07/17/07/17